

Softform Active[®] 2 Rx

Stark gegen Druck



Das patentierte Hybrid-Matratzensystem
für Wechseldruck und Weichlagerung

EIN MATRATZENSYSTEM - DOPPELTE WIRKUNG

Matratzensysteme wirken gegen Dekubitus, indem sie den Druck verteilen: entweder über die Vergrößerung der Auflagefläche oder durch die zeitlich abwechselnde Verteilung des Druckes. Invacare kombiniert diese zwei Wirkprinzipien in seinem patentierten Hybrid-System „**Softform Active® 2 Rx**“.

6

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

1

Intelligentes, intuitiv bedienbares System

- ▶ Einfach einstecken, einschalten und schon nimmt das Steuergerät ohne weitere Einstellungen seine Funktion auf. Das System ist ohne weitere Wartezeit sofort benutzbar.



2

Übersichtlich und leise: das Steuergerät Active 2 Rx

- ▶ Das Gerät arbeitet mit < 24 dB(A) besonders leise. Eine grüne LED informiert über den korrekten Betriebsstatus. Bei Fehlern leuchtet eine der drei roten LEDs auf und es ertönt ein akustischer Alarm, der durch die Mute-Taste stummgeschaltet werden kann.

3

CPR-Anschluss

- ▶ Direkt am Gerät erreichbar; die Luft ist nach 20 Sekunden abgelassen.



4

Indirekter Wechseldruck mit hoher Compliance

- ▶ Durch den geschichteten Aufbau und die Position der Luftzellen innerhalb der Schaumstoffmatratze erfährt der Patient niemals extreme Druckspitzen, sondern stets eine angenehme, abgemilderte Druckverteilung. Eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz und den Erfolg der Therapie.



- ▲ Indirekter Wechseldruck mit 10-minütigem Zyklus

5

Weichlagerung

- ▶ Der Kern der Matratze besteht aus einem zweilagigen Schaumstoff und einer Wechseldruckzelleneinlage. Die Randzonen sind verstärkt, sodass der Patient am Matratzenrand bequem und sicher sitzen kann. Auch ohne Betrieb des Steuergerätes bietet das System eine hochwertige Weichlagerung, ideal z.B. beim Patiententransport.



6

Wirksam gegen Scherkräfte: innovatives Gleitsystem

- ▶ Die Unterseite der oberen Matratzenschicht ist gleitfähig und dadurch werden beim Verstellen der Liegefläche die Scherkräfte auf ein Minimum reduziert. Der atmungsaktive Dartex PU Bezug ist dicht gegen Flüssigkeiten, Viren und Bakterien.



Technische Daten ▼

Für weitere Produktinformationen, einschließlich der Gebrauchsanweisung, besuchen Sie bitte www.invacare.de.



Softform Active 2 Rx Matratze	Breite ▼	Länge ▼	Höhe ▼	Gesamtgewicht ▼	Max. Nutzergewicht ▼	Max. Wascht emperat ur Bezug ▼
	90 cm oder 100 cm	200 cm	152 mm	14 kg	247,6 kg	80°

In individuellen Größen als Sondermaß erhältlich: Breite: 83 - 90 cm, Länge: 181 - 210 cm (jeweils in 10 mm Abständen)



Steuergerät	Tiefe ▼	Breite ▼	Höhe ▼	Gewicht ▼
	105 mm	275 mm	155 mm	1,75 kg

Bezugfarbe ▼ Regulatorisches ▼



Blau

Brandschutz gemäß:

BS EN 597-1 Cig
BS EN 597-2 Match
BS7177:1996 Crib 5
BS7177:2008

Steuergerät

Betriebsgeräusch: ≤ 24 dB(A)
Zyklus: 10 Minuten (indirekter Wechseldruck)

Die effektive Prävention von Dekubitus ist eine Kernaufgabe in der Pflege. Diese Matratze ist als druckentlastendes und -verteilendes Hilfsmittel eine sinnvolle Unterstützung im Plan einer Dekubitus-Prävention und -Therapie. Hauptfaktoren in der Dekubitus-Prävention sind Schulung, klinisches Urteilsvermögen und die individuelle Maßnahmenplanung abhängig vom Dekubitusrisiko. Für die formale Einschätzung des Dekubitusrisikos gibt es eine Vielzahl an Skalen, die in Verbindung mit einer praktischen Einschätzung (Beurteilung durch pflegerisches Wissen) eingesetzt werden sollten.

Bitte beachten:
Die Farbangabe kann geringfügig abweichen.



Invacare GmbH
Am Achener Hof 8
88316 Isny
Deutschland
Telefon +49 7562 700-0
kontakt@invacare.com
Web www.invacare.de

Invacare Austria GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
5310 Mondsee
Österreich
Telefon +43 6232 553-50
Fax +43 6232 553-54
info-austria@invacare.com
Web www.invacare.at

Invacare AG
Benkenstrasse 260
4108 Witterswil
Schweiz
Telefon +41 61 48770-80
Fax +41 61 48770-81
switzerland@invacare.com
Web www.invacare.ch



© 2020 Invacare International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben entsprechen bei Drucklegung dem aktuellsten Stand. Technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Active 2Rx - DE - 11/2020 - 1643729

Auforum AG · 061 411 24 24
Im Steinenmüller 2 · 4142 Münchenstein
info@auforum.ch · www.auforum.ch

Auforum AG · 041 712 14 14
Bösch 47 · 6331 Hünenberg
zug@auforum · www.auforum.ch

auforum
Beste Produkte für Pflege und Komfort.