

T-20 Toilettenstütze

Der robuste Toilettenaufsatz

MESSKON
Entwicklung · Herstellung

Beschreibung / Produktkategorie

- Hilfsmittel für Sanitäre Einrichtungen
- Armlehnen sind einzeln hochklappbar und selbsthemmend
- Sehr stabile Ausführung
- Die Toilettenstütze ist vollflächig auf dem WC abgedichtet
- Feste Montage auf der Toilettenschüssel (anstelle des gewöhnlichen WC Sitzes)
- Hochwertige Duroplast Sitzgarnitur mit Softclose, einfach und ohne Werkzeug zu entfernen
- Grundmaterial komplett aus rostbeständigem Edelstahl
- Oberfläche: pulverbeschichtet weiss (Pigment)

Technische Daten

- Material: Rostbeständiger Edelstahl (1.4301)
- Armauflage: Kunststoff
- Breite zwischen den Armlehnen: 520mm
- Höhe der Armlehnen vom WC-Sitz: 260mm
- Belastung WC- Sitz: 160 kg
- Gesamtgewicht: 7 kg

Reinigung

Reinigen Sie das Gerät regelmässig mit einer milden Seifenlösung. Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Diese können zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Spülen Sie das Gerät nach der Reinigung mit klarem Wasser gründlich nach.

Der T-20 passt auf alle gängigen Toiletten mit durchgängiger Befestigungsmöglichkeit.



Swiss
made

Montagehinweis:

Die WC Schüssel muss Durchgangslöcher haben.
Die alte Sitzgarnitur demontieren, T-20 auf die WC Schüssel setzen und durch die bestehende Durchgangslöcher befestigen.

